

Procesadores de sonido Naída CI serie Q

En esta guía se proporciona información básica necesaria para la adaptación, el cuidado y la resolución de problemas de los procesadores de sonido Naída CI serie Q.

Compatibilidad

Los procesadores de sonido Naída CI Q90, Q70 y Q30 son compatibles con los dispositivos internos HiRes™ Ultra, HiRes 90K™ Advantage, HiRes 90K™ y CII.

Componentes



Indicaciones de la luz LED

Estado de comunicación (bloqueo)

- Rojo intermitente significa pérdida de bloqueo del implante

Estado de la batería

- Cuatro parpadeos anaranjados durante el encendido indican que la batería está totalmente cargada.
- Un parpadeo anaranjado indica que la batería está casi descargada.

Estado del micrófono/posición del programa

- Un parpadeo verde significa que el procesador de sonido y el micrófono responden a sonidos de entrada intensos.
- Los parpadeos verdes también corresponden a cambios de programa; por ejemplo: un parpadeo indica el programa 1, dos parpadeos indican el programa 2, etc.

Cuidado y mantenimiento

- El cuidado diario y el uso adecuado del dispositivo harán que el procesador de sonido Naída CI tenga un funcionamiento óptimo.
- Inspección visual diaria del procesador de sonido Naída CI y de sus componentes
- Limpie el procesador de sonido Naída CI y las piezas con un paño suave humedecido. Nunca use agentes de limpieza, como detergentes de uso doméstico, jabón, etc., para limpiar el dispositivo.
- Guarde el dispositivo Naída CI en el Zephyr Dry & Store® todas las noches.
- Para evitar que los contactos de la batería acumulen impurezas, conecte las cubiertas de la batería PowerCel del Naída CI a las baterías PowerCel cuando no las use.
- Las tapas de los micrófonos deben sustituirse cada tres meses, o antes si se aprecia una disminución en la calidad sonora.